

TITANIUM CH-05 Арт. 34004



СТУЛ ДЛЯ ВАННОЙ

Руководство пользователя




- Перед началом сборки убедитесь, что все детали и крепеж присутствуют и соответствуют списку в инструкции.
- Убедитесь, что нет повреждений на элементах.
- Ознакомьтесь со всей инструкцией до начала сборки — это поможет избежать ошибок.
- Следуйте шагам строго по порядку, не пропуская этапов.
- Собирайте и устанавливайте изделие на ровной поверхности.
- Обеспечьте достаточное пространство для комфортной работы.
- Не применяйте чрезмерную силу — это может повредить изделие.

ДЕТАЛИ СТУЛА ДЛЯ ВАНН

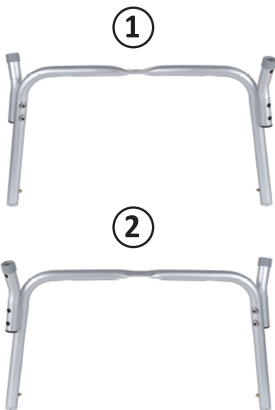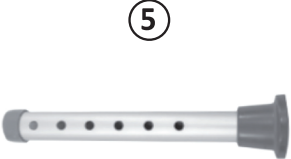
 ① ②	Основной каркас 1 шт	 ③	Подлокотник 2 шт
 ④	Сиденье 1 шт		Шайба 5 шт
 ⑤	Опорные ножки 4 шт		Винт 5 шт

ПОЭТАПНАЯ СХЕМА СБОРКИ

1. Соедините основной каркас с опорными ножками и отрегулируйте на одинаковую высоту.

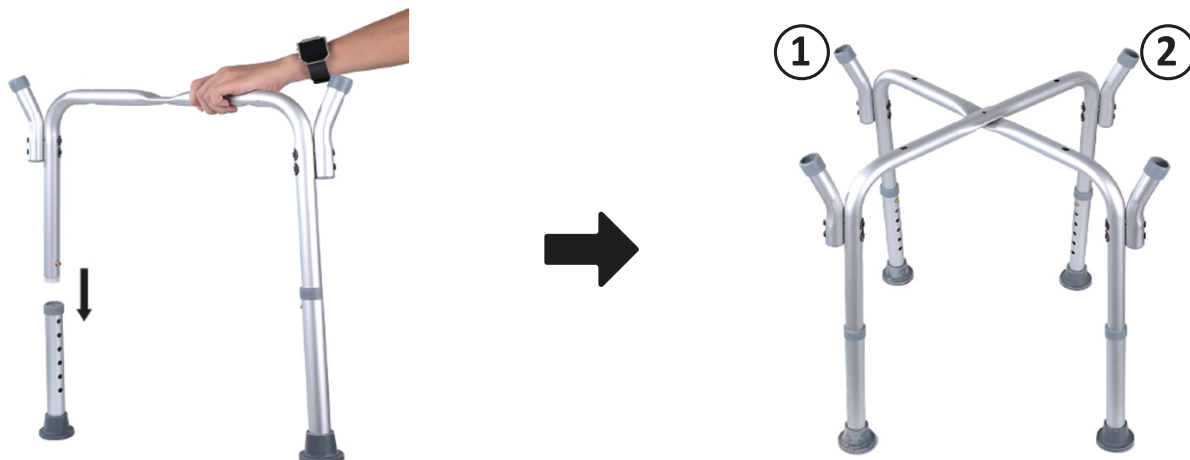

2. Зафиксируйте основной каркас на сиденье с помощью винтов и шайб.

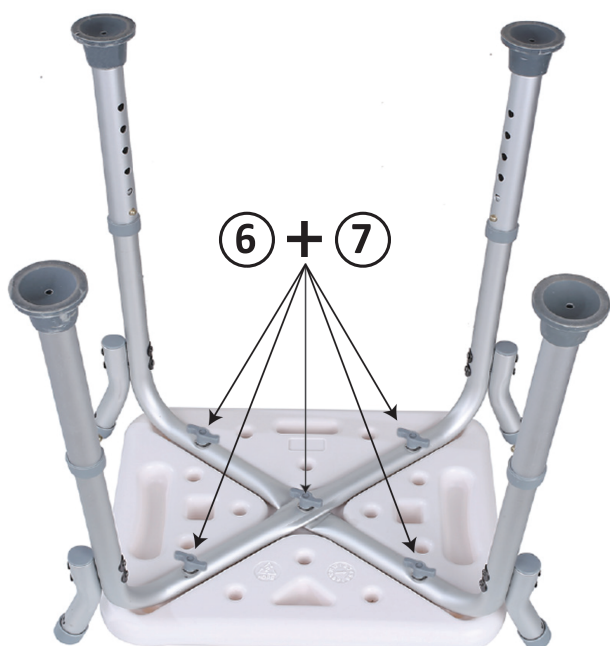

3. Установите подлокотники в основной каркас.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Стул для ванн предназначен для комфортного и безопасного купания людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, беременных женщин, а также тех, кто находится на реабилитации.

- Максимальная нагрузка на стул 135 кг
- Чистку поверхностей изделия производите влажной тканью. При необходимости используйте специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
- Не используйте абразивные средства, растворители, ацетон, спирт и другие агрессивные химикаты.
- Периодически проверяйте и подтягивайте винты и крепления.

Изготовитель: Ханчжоу Кайфань Е-коммерс Компани Лимитед

Адрес: Комплексив Билдинг, Сауф Индустриал Фанкционал Ареа, Мэйчэн Таун, Цзяньдэ Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «ТД Компания Дефендер»

Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение 111, комната 3, офис 63.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебелиной продукции" (ТР ТС 025/2012).

Гарантия на изделие составляет 6 месяцев с даты покупки при условии соблюдения правил сборки, эксплуатации и ухода.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке

EAC